

SCHEDA TECNICA



MASKITA®

Mascherina chirurgica monouso per adulti

Codice Articolo : **MSK.OLIVE**

Tipo: **II R**

Classe di rischio: **1**

Classe del dispositivo medico: **T020601**

DESCRIZIONE

MASKITA® è una mascherina chirurgica di tipo II R monouso, non sterile, per adulti, prodotta in Italia.

Come tale è un dispositivo medico dotato di marchio CE, iscritto nel repertorio dei dispositivi medici del Ministero della Salute, col numero di registrazione: 2142080.

Se correttamente indossata consente di coprire naso, bocca e mento contribuendo a ridurre l'emissione di goccioline d'acqua contenenti virus e batteri ("droplet") potenzialmente presenti nel cavo orale e nelle prime vie respiratorie da parte di chi lo indossa.

Grazie alla sua comprovata resistenza agli schizzi è adatta anche per uso medico in ambienti sanitari.

CONFORMITA'

Il dispositivo medico è conforme alla seguente normativa cogente:

D. LGS. 46/1997, recepimento dir. 93/42/CEE

e alle seguenti norme tecniche:

UNI EN 14683:2019

UNI EN 10993-1:2010

UNI EN 14971:2020

COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

MASKITA® è composta da 3 strati di tessuto non tessuto SMS (Spunbond-Meltblown-Spunbond) realizzati in polipropilene polipropilene saldati insieme tramite le moderne tecnologie ad ultrasuoni. Lo spunbond compone gli strati esterni della mascherina mentre il meltblown costituisce lo strato filtrante intermedio.

La mascherina è dotata di elastici per il corretto e agevole allacciamento dietro le orecchie e di un nasello sul margine superiore così da consentirne una migliore adesione al volto dell'utilizzatore.

I materiali a contatto con la pelle dell'utilizzatore sono idonei all'uso in ambito medicale, e non contengono lattice.

Grazie al suo BFE > 98%, può contribuire a limitare il rischio di diffusione di malattie respiratorie in ambienti domestici, di lavoro o in collettività.

DIMENSIONI

175 mm x 94 mm circa per la parte filtrante, senza l'ingombro degli elastici.

CONFEZIONAMENTO E MATERIALE DI IMBALLAGGIO

Ogni cartone contiene 36 confezioni da 10 pezzi cadauna di MASKITA®.

Ogni confezione da 10 pezzi riporta apposita etichettatura per l'identificazione e relative istruzioni.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo da luce diretta e da fonti di calore o fiamme libere o dall'irraggiamento solare intenso.

Si raccomanda di utilizzare le mascherine entro 2 anni dalla data di produzione indicata nella confezione/etichetta.

SMALTIMENTO

Dopo l'uso, gettare le mascherine potenzialmente contaminate immediatamente in un idoneo contenitore chiuso e sanificarsi bene le mani. Non abbandonare nell'ambiente. Lo smaltimento deve essere effettuato in accordo alle normative vigenti.

AVVERTENZE

Non adatto ai bambini.

Non lavare, non riutilizzare e non destinare ad altri usi.

Alle corrette condizioni di utilizzo, ad oggi non sono note reazioni cutanee di ipersensibilità. In caso di loro comparsa, sospendere immediatamente l'uso ed effettuare immediata comunicazione a info@maskita.eu

Dati e informazioni in questa scheda tecnica sono basati sulle conoscenze disponibili alla data di emissione: l'utilizzatore deve assicurarsi della congruità e della completezza delle informazioni in relazione all'uso che ne deve fare.